

help4skin

WOUND HEALING

Žaizdų gijimą skatinantis hidrokoloidinis gelis

SKATINA ŽAIZDŲ, NUDEGIMŲ GIJIMĄ

Be parabenu

Be antibiotikų

ODA

Oda yra didžiausias žmogaus kūno organas, užtikrinantis kasdienę apsaugą nuo kenksmingų veiksnių. Jei oda pažeista, mes tampame jautresni infekcijoms ir uždegimams. Nors daugeliu atvejų mūsų organizmas gali savarankiškai atkurti odą, būtina tinkamai prižiūrėti nudegimus ir žaizdas, kad būtų išvengta komplikacijų, susijusių su gijimo ir atsistatymo procesais.

Organizmas reaguoja į žaizdas, todėl susidaro šašai, kurie uždengia pažeistą odą ir sudaro barjerą nuo mikroorganizmų. Tai lėtina gijimo procesą ir žymiai padidina randų atsiradimo riziką, nes formuojant naują odos sluoksnį reikia nuimti šašą. Taigi, be dezinfekcijos, žaizdos gijimo metu būtina palaikyti tinkamą drėgmės lygį. Be to, daugelis žaizdų (pavyzdžiui, nudegimai) iš pradžių išdžiūsta ir paskui išskiria drėgmę. Štai kodėl naudojamas „inovatyvus hidrogelis“ **Help4Skin Wound Healing**: jis apsaugo žaizdą nuo išsausėjimo, išskirdamas drėgmę, o tuo pačiu sugeria drėgmę, kai žaizda tampa per drėgna. Tik ideali žaizdos drėgmė neleidžia susidaryti šašams ir odos skilinėjimui, užtikrina optimalią odos regeneraciją ir apsaugo nuo randų susidarymo. Be to, dėl sudėtyje esančių pagalbinių medžiagų, **Help4Skin Wound healing** iš karto atvėsina ir nuramina nudegusią odą ir taip palaiko hidrogelio („Actipientia“) poveikį.

Help4Skin Wound Healing yra hidrogelis be parabenu, kurio veiksmingumas įrodytas.

- Iš karto malšina skausmą
- Sumažina randų susidarymo riziką
- Pagreitina gijimą
- Padeda išvengti infekcijos
- Sukuria apsauginį barjerą
- Atvėsina

SUDĖTIS

Help4Skin WOUND HEALING yra „inovatyvus“ hidrogelis, kuris reguliuoja drėgną žaizdos aplinką, uždengtą tvarsčiu. Jame yra rūgštinio karbomero, stabilizuojamo karnozino (bazinio peptido, natūraliai esančio odoje), kuris padeda kontroliuoti infekciją.

Produktas gali būti naudojamas tiek sausoms, tiek šlapioms žaizdoms gydyti, pavyzdžiui:

- Nedidelėms žaizdoms
- Įbrėžimams
- Nudegimams
- Įpjovimams
- Nubrozdinimams ir įtrūkimams.

Tinka naudoti vyresniems nei 2 metų vaikams.

SUDEDAMOSIOS DALYS

Rūgštinis koloidinis karbomeras, L-karnozinas, vanduo, cetearilo etilheksanoatas, stearilo heptanoatas, natrio benzoatas, kalio sorbatas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kruopščiai nusiaplaukite rankas prieš ir po naudojimo.

Nedidelėms žaizdoms:

- Išvalykite ir dezinfekuokite žaizdą.
- Jei reikia, nusauskite sterilia marle.

- Produktą tepkite ant žaizdos vieną ar du kartus per dieną, neliesdami aplikatoriaus antgaliu žaizdos. Gelio įtrinti nereikia.
- Jei reikia, uždėkite pleistrą arba tvarstį. Kiekvieną kartą naudokite naują tvarstį.

Paviršiniams nudegimams:

- Nedelsdami atvėsinkite nudegusią vietą po drungnu tekančiu vandeniu 20 minučių. Tai turėtų būti padaryta kuo greičiau, nes teigiamas vėsinimo poveikis išnyksta po 30 minučių. Kad būtų išvengta pernelyg didelio atvėsinimo, nerekomenduojama naudoti per šalto vandens.
- Produktą tepkite ant žaizdos vieną ar du kartus per dieną, neliesdami aplikatoriaus antgaliu žaizdos. Gelio įtrinti nereikia.
- Uždėkite pleistrą arba tvarstį ir kiekvieną kartą naudokite naują tvarstį.

Nudegimams ir odos sudirginimui po saulės poveikio

- Nuvalykite gydomą vietą.
- Produktą tepkite ant žaizdos vieną ar du kartus per dieną, neliesdami aplikatoriaus antgaliu žaizdos. Gelio įtrinti nereikia.
- Jei reikia, uždėkite pleistrą arba tvarstį. Kiekvieną kartą naudokite naują tvarstį.



ATSARGUMO PRIEMONĖS

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui arba alergijai bet kuriai sudedamajai daliai. Labai retais atvejais buvo pranešama apie odos dirginimą. Jei pasireiškia dirginimas ar alerginė reakcija, nedelsiant nutraukti produkto naudojimą.

Help4Skin Wound healing negalima tepti ant didelių nubrozdinimų (> 20 cm² ploto).

Help4Skin Wound healing gali būti naudojamas ant paviršinių epidermio ir (arba) dermos nudegimų, paprastai pasižyminčių patinimu, odos paraudimu ir pūslėmis.

Netepkite **Help4Skin Wound healing** ant veido, akių, vokų ir gleivinės.

Visada pasitarkite su gydytoju:

- kai žaizdos didelės, plačios ar labai gilios;
- kai žaizdos mažos ir labai užkrėstos;
- kai žaizdos gyja lėtai arba yra komplikacijų pavojus.

Tokiais atvejais **Help4Skin Wound healing** gali būti naudojamas, tačiau tai negali būti vienintelis naudojamas gydymas.

Tik išoriniam naudojimui.

Nenaudoti produkto po galiojimo datos pabaigos (žr. ant pakuotės).

SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti 5–25 °C temperatūroje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Ši informacija paskutinį kartą peržiūrėta 2019 m. kovo mėn.

50 g



OYSTERSHELL NV
NIJVERHEIDSWEG 10
9820 MERELBEKE, BELGIJA



Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19, Lenkija
83-200 Starogard Gdański
Lenkija

CE 1639